

Mezinc[®]

2,4 mg Zn/cm²

Medicinskt plåster



**Sterilt, tättslutande och antibakteriellt.
Innehåller zink som gynnar läkning.**

Registrerat läkemedel

Egenvård av sår och självsprickor

Olika typer av sår kan behöva behandlas på olika sätt. Stora, svårläkta sår skall alltid behandlas enligt anvisningar från sjukvården. Mindre sår och självsprickor kan med fördel behandlas genom egenvård.

Mezinc är ett tättslutande sterilt plåster som skyddar såret och har en antibakteriell effekt.

Mezinc skapar en fuktig sårmiljö och avger fortlöpande zink till såret, vilket är bra för läkningsprocessen.

Mezinc plåster:

- Effektivt och välbeprövad
- Enkel att använda, kan klippas till önskad storlek
- Fäster bra, tål väta

Observera:

Vid överkänslighet av kolofonium eller zink bör plåstret ej användas. Lokala hudreaktioner kan ibland uppträda även hos icke allergiska personer.

Så här används plåstret

1. Rengör såret och klipp till plåstret så att förbandet täcker 2-4 mm av den omgivande huden. Vid inflammerad eller skör hud, bör förbandet täcka enbart sårytan. Vid småsår som t ex självsprickor, kan plåstret täcka större områden runt såret.
2. Lägg plåstret direkt på såret. Det är viktigt att den omgivande huden är torr för att plåstret skall fästa väl. För att plåstret skall sitta bra på t ex hälar eller fingertoppar, klipps flikar i plåstrets kant.



3. Bildas en gulaktig vätska under förbandet kan den torkas bort med en torr kompress.
4. Vanligen byts plåstret varannan till var tredje dag. Om såret vätskar mycket bör förbandet bytas dagligen och kompletteras med ett yttre absorberande förband.

**Sterilt, tättslutande
och antibakteriellt.
Innehåller zink som
gynnar läkning.**



Mezinc läker sår enkelt och snabbt

Mezinc plåster är ett tättslutande och skyddande sårförband som används för att påskynda läkning av sår. Plåstret är antibakteriellt och avger zink som gynnar läkningsprocessen.

För egenvård kan Mezinc plåster användas vid behandling av t ex skavsår, skrubbsår, skär-sår och hudsprickor.

Indikation: För sår av olika genes (t ex bensår, trycksår, brännskador) samt småsår (t ex skavsår, skrubbsår, skärsår, hudsprickor).

De större förpackningarna ingår i högkostnadsskyddet (ej 6x7 cm 1 och 2 pack).

Se FASS för ytterligare information.



ABIGO Medical AB • Ekonomivägen 5 • 436 33 Askim

Tel: 031-748 49 50 • Fax: 031-68 39 51 • pharma@abigo.se • www.abigo.se