



FÖRSTA HJÄLPEN VID UNDERTRYCK I MELLANÖRAT

**OTOVENT®**



ABIGO Medical AB · Ekonomivägen 5 · 436 33 Askim  
Tel 031-748 49 50 • Fax 031-68 39 51 • E-post: [pharma@abigo.se](mailto:pharma@abigo.se) • [www.abigo.se](http://www.abigo.se)

# Otovent<sup>®</sup>-metoden

## Varför skall man använda OTOVENT?

Du har fått konstaterat att det finns ett undertryck i mellanörat. Obehandlat undertryck leder till tillfällig tyngdkänsla samt hörselnedsättning. Efter ett fåtal veckor bildas dessutom vätska i mellanörat.

Med OTOVENT utjämnas trycket och besvären lindras. De medicinska ballonger som medföljer förpackningen ger vid behandling det tryck som är nödvändigt för ett bra behandlingsresultat. Varje ballong kan användas för 20 uppblåsningar.

**OBS:** Använd inga andra ballonger.

## Hur används OTOVENT?

1. Sätt på ballongen på nässtycket.
2. Håll nässtyckets runda del tätt mot höger näsborre. Den vänstra näsborren kläms ihop.
3. Andas in djupt, stäng munnen och blås upp ballongen till en grapefrukts storlek.
4. Upprepa samma procedur via vänster näsborre.

Behandlingen fungerar om Du/barnet upplever tryckökning och /eller ett "klick" i örat

## Om Du/barnet inte upplever någon effekt:

5. Upprepa steg 2-3, men låt sedan luften gå tillbaka via näsan samtidigt som du/barnet sväljer.
6. Upprepa samma procedur via vänster näsborre.

Vid känd eller misstänkt latexallergi skall OTOVENT inte användas.

## Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder OTOVENT!

**Förpackning:** 1 nässtycke, 5 OTOVENT-ballonger. Varunr. 295741. **Köps på apotek.**

Använd Otovent \_\_\_\_\_ gånger/dag

Behandlingstid \_\_\_\_\_ månader