


Eclipse

Högabsorberande förband

Produktbeskrivning

Ett högabsorberande förband för rikligt vätskande sår. Förbandet är designat för att kunna hantera mycket stora vätskemängder vilket medför att macerationsrisken minskar på frisk hud. Eclipse består av ett snabb absorberande material och Xu-lock system som binder kvar vätskan i förbandet. Förbandet är sträcktåligt och håller kvar vätskan väl även när det är maximalt fyllt. Vätskebarriär är den beige/bruna polyetylenlagret som andas och skapar en bakterieskyddande barriär.

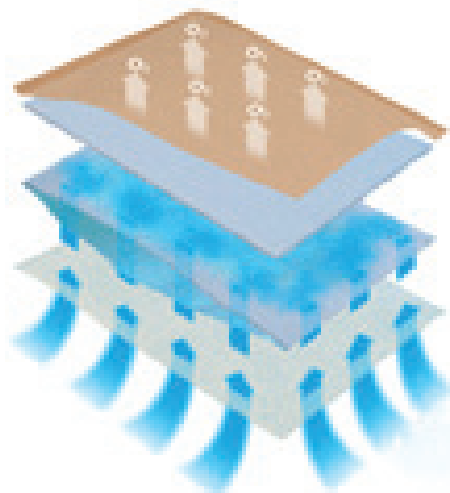

Bruksanvisning

Förbandet läggs på med den vita ytan mot såret med minst 2 cm överlappning på frisk hud. Klipp inte i förbandet. Vid stora sår kan flera förband läggas bredvid varandra. Förbandsbyte skall ske, beroende på exsudatmängd, dagligen till en gång per vecka

Användningsområde

Alla rikligt vätskande sår, t ex:

- Bensår
- Trycksår
- Infekterade sår

Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Fuktig sår läkningsmiljö

Produkt	Varu nr	Storlek	Antal förp.
Eclipse	CR3818	10 x 10 cm	20
Eclipse	CR3769	15 x 15 cm	20
Eclipse	CR3743	20 x 30 cm	20
Eclipse	CR3808	60 x 40 cm	10

