

Eclipse Boot

Högabsorberande underbensförband



Produktbeskrivning

Eclipse stövel är ett högabsorberande förband, designat för att täcka behovet av ett mycket högabsorberande lättapplicerat underbensförband.


I förbandet kombineras ett snabbt absorberande material med Xu-lock systemet som binder kvar vätskan i förbandet.

Det beige/bruna ytskiktet andas och skapar en bakterieskyddande barriär.

Bruksanvisning

Veckla ut förbandet helt. Placera den vita sidan med den lilla triangeln mot hälen, spetsen upp mot patienten. Vik förbandet över foten och fäst med tejp. Vik därefter de större flikarna över underbenet och fäst även dessa med tejp. Eclipse boot kan användas under kompressionsförband.

Förbandsbyte, dagligen till en gång per vecka beroende av exsudatmängd.

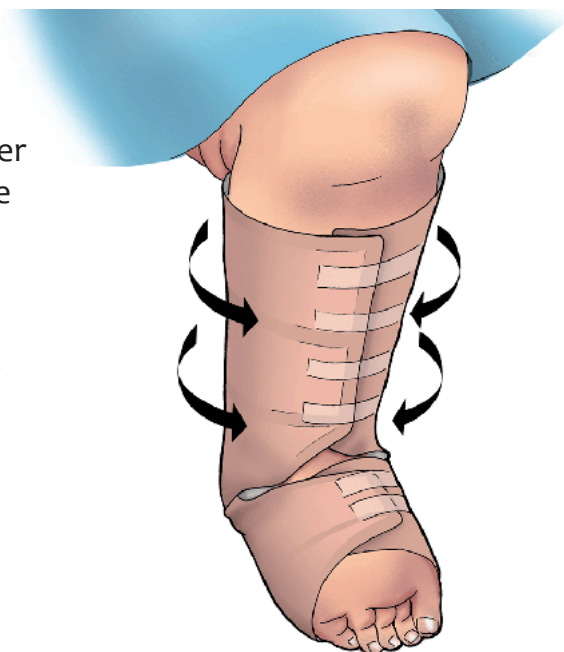

Användningsområde

Vätskande sår på underben som:

- Bensår
- Trycksår
- Arteriella sår
- Diabetes sår
- Lymfödem

Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Sträcktålig
- Tunn och smidig

Produkt
Eclipse Boot

Varu nr
CR4014

Storlek
60 x 70 cm

Antal förp.
5

