

Eclipse Adherent


Högabsorberande förband med kontaktlager av silikon

Produktbeskrivning

Ett högabsorberande förband för rikligt vätskande sår i kombination med Silfix mjuk silikon teknologi.

Silikonets naturliga egenskaper gör att det inte fäster i såret utan enbart på torr hud. Det mjuka kontaktlagret av silikon fäster skonsamt, är lätt och smärtfritt att avlägsna. Det mjuka Silfix silikonet skadar inte omgivande hud, nyläkt hud eller sårbedden. Det kan lyftas av och justreras utan att den vidhäftande förmågan minskar.

Förutom Siltex lagret finns ett snabb absorberande material och Xu-lock system som binder kvar vätskan i förbandet. Vätskebarriär är det beige/bruna polyetylenlagret som andas och skapar en bakterieskyddande barriär.

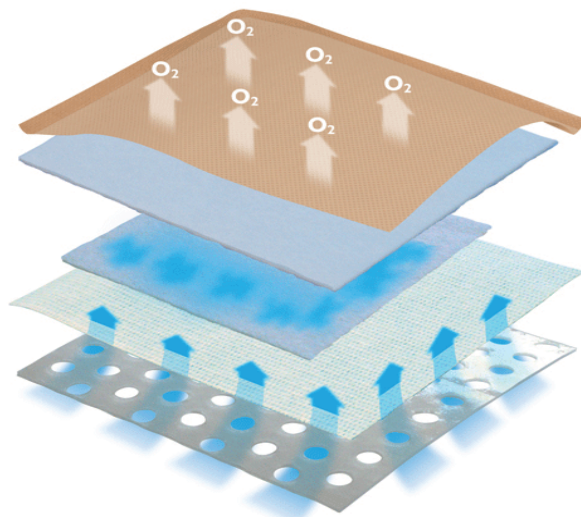

Bruksanvisning

Förbandet läggs på med silikonytan mot såret med minst 2 cm överlappning på frisk hud. Klipp inte i förbandet. Vid stora sår kan flera förband läggas bredvid varandra. Förbandsbyte, dagligen till en gång per vecka, beroende på exsudatmängd.

Användningsområde

Alla rikligt vätskande sår, t ex:

- Bensår
- Trycksår
- Infekterade sår

Fördelar

- Snabb absorption
- Hög vätskehanteringskapacitet
- Binder vätskan kvar i förbandet
- Vätsketätt ytterskikt som andas
- Atraumatisk fästyta av silikon
- Fuktig sårläkningsmiljö

Produkt	Varunr	Storlek	Antal förp.
Eclipse Adherent	CR3881	10 x 10 cm	10
Eclipse Adherent	CR3863	15 x 15 cm	10
Eclipse Adherent	CR3883	10 x 20 cm	10
Eclipse Adherent	CR3864	20 x 30 cm	10

