

Ytliga vätskande sår: torka med rundtork, applicera ett absorptionsförband direkt på såret (gröna sidan mot såret) och fixera.

Djupa sår: torka med en rundtork. Veckla ut och fluffa upp en eller flera kompresser eller tamponader och fyll sårhålan (packa inte). Se till att väven är i direktkontakt med hela sårytan. Täck med ett absorptionsförband (gröna sidan mot såret).

Fistlar: för in en tamponad i lämplig storlek. Om tamponaden klipps, rekommenderas att tamponaden förs in dubbelvikt med båda ändarna utanför fistelgången.

Torra till måttligt vätskande sår: använd Sorbact gel-kompress. Kombinerar efter behov med övriga Sorbact-produkter. Täck med ett fuktighetsbevarande förband t ex Sorbact kirurgiskt förband.

"Rena" sår: till exempel suturerade eller andra sår som bör skyddas. Applicera kirurgiskt förband direkt på såret och avlägsna guideskiktet från ovsidan.

Svampinfektioner mellan tår: applicera en smal tamponad zick-zack mellan tårna och fixera ändarna på ovsidan av fotryggen.

Svampinfektioner i hudveck: applicera någon av de breda tamponaderna alternativt kompresserna och fixera på lämpligt sätt.

Sorbact-metoden bygger på den naturliga processen, hydrofob interaktion. Detta innebär att två hydrofoba (vattenavstötande) ytor binder till varandra i närvaro av vätska.

De allra flesta patogena mikroorganismer är hydrofoba, och binder till Sorbacts hydrofoba yta.

Sorbact-metoden är effektiv när man vill minska infektionsrisken i "rena" sår, rensa upp vätskande, koloniserade till infekterade sår eller behandla svampinfektioner i hudveck.

Förbandens gröna hydrofoba yta skall alltid appliceras direkt mot sårytan. Det är viktigt att det finns direkt kontakt mellan Sorbact och sårytan, för att mikroorganismer skall kunna binda till förbandet.

Omlägningsfrekvensen är helt beroende av mängden exsudat eller förekomst av infektion.

Sårbehandling: 1 gång/dag till 2 gånger/vecka.

Svampbehandling: 1 gång/dag.

Kirurgiskt förband: låt sitta ca 3 dygn eller enligt ordination.

Sorbact[®]

Guide

Rensar upp infekterade sår.
Minskar risken för infektion i "rena" sår.
Behandlar svampinfektioner i hudveck.



Grön sårläkning

INDIKATION	ABSORPTIONS-FÖRBAND	KOMPRESS	TAMPONAD	RUNDTORK	GELKOMPRESS	KIRURGISKT FÖRBAND
						
Sår - ytliga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sår - djupa	✓	✓	✓	✓	✓	
Sår - operationssår	✓					✓
Fistlar	✓	✓	✓	✓	✓	
Svampinfektioner - mellan tår			✓			
Svampinfektioner - hudveck		✓	✓			