

**Sorbact®**  
**kirurgiskt förband**


Information till djurägare

# Sorbact® kirurgiskt förband

Sorbact kirurgiskt förband består av en absorberande non-woven dyna på en transparent semipermeabel film. Dynan verkar enligt Sorbact-metoden: Den binder och eliminerar mikroorganismer vilket ger en bakteriekontrollerande effekt. Förbandsfilmen är vattenavvisande, men släpper igenom vattenånga och syre.

## Skonsam borttagning

Sorbact kirurgiskt förband fäster väl mot huden och håller såret rent och torrt – till och med vid promenader i vått väder. Förbandet tas enklast bort enligt följande:

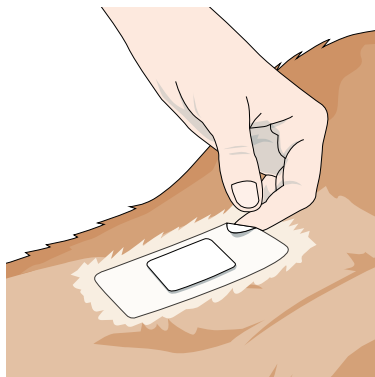

1. Peta upp ett litet hörn så du kan gripa tag i förbandsfilmen.



2. Sträck ut filmen – då släpper den och du kan få loss en bit. Upprepa runt om tills du tagit loss förbandet.

TIPS! Redan vid applicering kan man vika in ett litet "hundöra" i något av filmens hörn.

# Sorbact®


# Sorbact® kirurgiskt förband

## information till djurägare

Såret hos ditt husdjur har blivit omlagt med Sorbact kirurgiskt förband. Detta förband skyddar såret under den första läkningstiden, samtidigt som det binder till sig sårbakterier och minskar risken för infektion. Sorbact kirurgiskt förband fäster ordentligt mot huden och håller såret rent och torrt – till och med vid promenader i vått väder.

Låt Sorbact kirurgiskt förband sitta kvar i \_\_\_\_\_ dygn innan du tar bort det.

### Så här tar du lättast bort Sorbact kirurgiskt förband

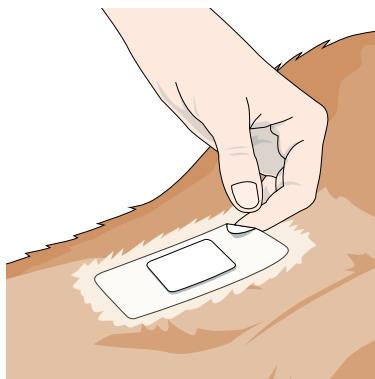

1. Peta upp en flik i ett av hörnen. Klia precis vid kanten och peta upp efter hand. Ta god tid på dig. Ibland har vårdpersonalen redan gjort ett "hundöra" – då kan du börja där.



2. När du fått loss ett hörn som du kan få grepp om, sträck ut filmen som ett gummiband längs med huden. Håll fast över förbandet med andra handen. Dra inte uppåt om inte förbandet sitter väldigt löst. Ta pauser om det behövs – det gör inget om djuret går omkring med ett halvlossat förband. Be kliniken om hjälp om du inte klarar det själv.

Kontakta din veterinär om du har ytterligare frågor om sårläkningen eller Sorbact kirurgiskt förband.



# Sorbact®

## Hur fungerar Sorbact?

Sorbact-metoden bygger på en naturlig process – hydrofob interaktion. Denna innebär att två vattenavstötande (hydrofoba) ytor binder till varandra i närvaro av vätska. De allra flesta patogena mikroorganismer är hydrofoba och binder därför till Sorbacts yta vilken också är hydrofob. När Sorbact lyfts bort från såret, följer bundna mikroorganismer med. Sorbact används för att minska infektionsrisken i ”rena” sår, rensa upp vätskande, koloniserade eller infekterade sår samt behandla svampinfektioner i hudveck.

## Sorbact – grönsårsläkning – för alla sår

Produkt	Storlek	Antal/ förp	Produkt	Storlek	Antal/ förp
Absorptionsförband	7 x 9 cm	20 st	Gelkompress	7,5 x 7,5 cm	10 st
Absorptionsförband	10 x 10 cm	20 st	Gelkompress	7,5 x 15 cm	10 st
Absorptionsförband	10 x 20 cm	10 st	Kirurgiskt förband	5 x 7,2 cm	100 st
Kompress	4 x 6 cm	40 st	Kirurgiskt förband	8 x 10 cm	20 st
Kompress	7 x 9 cm	40 st	Kirurgiskt förband	8 x 15 cm	20 st
Tamponad	1 x 50 cm	20 st	Kirurgiskt förband	10 x 20 cm	20 st
Tamponad	2 x 50 cm	20 st	Kirurgiskt förband	10 x 25 cm	20 st
Tamponad	5 x 200 cm	10 st	Kirurgiskt förband	10 x 30 cm	20 st
Tamponad	10 x 200 cm	10 st	Kirurgiskt förband	10 x 35 cm	20 st
Rundtork, 5 st	Ø 3 cm	14 st			

## Sorbact konsumetförpackningar – finns att köpa på utvalda apotek

Produkt	Art. nr	Storlek	Antal/förp
Absorptionsförband	268078	7 x 9 cm	5 st
Kompress	268102	7 x 9 cm	10 st
Tamponad	204812	5 x 200 cm	2 st
Tamponad	210769	10 x 200 cm	1 st
Bakteriebindande plåster	210770	5 x 7,2 cm	5 st
Bakteriebindande plåster	752140	8 x 10 cm	5 st

