

# Sorbact®



Patientinformation –  
svampinfektion i hudveck

Sorbact är en enkel och effektiv behandling vid svampinfektioner i hudveck, t ex bukveck, under bröst och i ljumskar – utan risk för resistensutveckling eller negativ miljöpåverkan.

## Gör så här

1. Klipp Sorbact tamponad till önskad längd.
2. Lägg tamponaden i hudveck och fixera med BH, åtsittande kalsong/trosa eller hudvänlig häfta. (Fäst häftan utanför det infekterade området.)
3. Byt tamponaden 1 gång dagligen.
4. Fortsätt behandlingen ett par dagar efter att rodnaden har försvunnit. Vanlig behandlingstid är 5–10 dagar.

OBS. Använd inte Sorbact tamponad tillsammans med feta krämer eller salvor, då detta kan försämra effekten.

Sorbact extra bred tamponad  
10 x 200 cm – vnr 210769.

**Sorbact extra bred tamponad  
finns att köpa på utvalda apotek.**



ABIGO Medical AB • Ekonomivägen 5 • 436 33 ASKIM  
Tel 031-748 49 50 • Fax 031-68 39 51 • [www.abigo.se](http://www.abigo.se)