

VAXOL®

ENKELT OCH NATURLIGT

Registrering

Medicinteknisk produkt, klass 1, CE.

Produktbeskrivning

Öronspray med renad olivolja.



Användning

Mjukar upp och avlägsnar öronvax samt vaxproppar.

Lindrar även klåda och irritation orsakad av torr hud i hörselgången.

Bruksanvisning

Enkel att använda. Vaxol kan användas sittande eller stående.

Värm flaskan i handen och skaka väl innan användning. Håll flaskan i upprätt ställning med spraymunstycket placerat i yttre hörselgången och tryck ner sprayhuvudet helt 1 eller 2 gånger. Massera försiktigt vid öppningen till yttre hörselgången.

Dosering

För mjukgöring av öronvax:

Spraya 1-2 doser 2 gånger dagligen i 4-5 dagar.

(Fungerar även som förbehandling till öronspolning.)

För att förebygga vaxproppar:

Använd Vaxol 1-2 gånger i veckan.

Vid klåda och irritation i torra hörselgångar:

Spraya 1-2 gånger i veckan.

Innehåll

Naturlig olivolja framställd enligt farmaceutisk standard. Innehåller 10 ml.

Bra att veta

Kan användas av vuxna och barn över 1 år.

Bildar barriär till vatten vid simning, dusch och bad.

Spraymunstycket kan vid behov tas bort och sköljas i varmt vatten.

Vaxol är hållbar i 6 månader efter att sprayflaskan har öppnats.

Mer information finns på www.vaxol.se

Marknadsförs av

ABIGO Medical AB

Tel: 031-748 49 50

e-post: pharma@abigo.se

